

Vård och omsorgsförvaltningen

Godkänd Annika Erikssosn Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Vård och omsorgsförvaltnigenn	Löpnr Ange löpnr.	Dokumentklass Riktlinje	Version 1.1	Sida 1(3)
Författare Katarina Funseth Medicinskt ansvarig Rehabilitering, Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sköterska, med stöd av Matilda Foborg Region Västernorrland hygienjskusköterska			Datum: 2021-06-24	Datum fastställande: 2021-06-24

Riktlinje för rengöring av hjälpmedel i ordinärt boende

Inledning

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Nytt hjälpmedel som köps in eller förskrivs bör så långt det är möjligt vara av material som går att desinfektera och textilier eller textila delar bör gå att ta av och tvätta i minst 60°C.

Tillverkaren ansvarar för att i bruksanvisningen ange på vilket sätt produkten ska desinfekteras.

Hjälpmedel Västernorrland hanterar inte smittat gods. Hjälpmedlen ska således vara rengjorda innan de lämnas för hämtning alternativt skickas för återlämning. Ingen märkning behöver eller ska därför ske. Basala hygienrutiner ska tillämpas vid rengöringen.

Allmän rengöring

Rengöring

Användaren själv, anhöriga, hemtjänstpersonal eller personliga assistenter ansvarar för den regelbundna skötseln och rengöring av hjälpmedel.

Hjälpmedlet rengörs med rengöringsmedel och vatten regelbundet samt vid behov när det är smutsigt.

Praktiska råd vid rengöring av hjälpmedel från användare med känd smitta inför återlämnande till Hjälpmedel Västernorrland.

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera kasseras. När hjälpmedlet kasseras skall kontakt med kommunens hjälpmedelscontroller tas för vidare instruktioner.

Godkänd Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Vård och omsorgsförvaltningen	Löpnr Ange löpnr.	Dokumentklass Riktlinje	Version 1.1	Sida 2(3)
Författare Katarina Funseth Medicinskt ansvarig Rehabilitering, Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sköterska, med stöd av Matilda Foborg Region Västernorrland hygiensjuksköterska			Datum: 2021-06-24	Datum fastställande: Ange datum

Hjälpmålet får inte lämna patientens bostad innan det omhändertagits enligt följande:

- Tag på engångsskoskydd, desinfektera händerna, tag på engångsförkläde i plast.
- Lagg plast under hjälpmålet för att skydda golvet från vatten och rengöringsmedel.
- Desinfektera händerna och tag på skyddshandskar.
- Gör rent hjälpmålet med rengöringsmedel och vatten om det är synligt smutsigt.
Använd en diskborste eller tvättsvamp vid rengöringen.
Desinfektera sedan hjälpmålet med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.
Tänk på om hjälpmålet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa
detaljer med en väl urkramad torkduk.
- Textilier läggs i säck för tvätt i maskinen. Tvättas i minst 60 °C.
- Tag av förkläde, handskar och desinfektera händerna. Använd diskborste eller
tvättsvamp, torkpapper, plastunderlägg etc. ska kasseras. Läggs i plastpåse som
försluts och hanteras som vanligt avfall.
- Låt hjälpmålet torka torrt.
- Tvätta händerna med tvål och vatten och låt torka. Desinfektera händerna.

**Ansvarsfördelning vid återlämning av hjälpmål inom
hemsjukvården**

Godkänd Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Vård och omsorgsförvaltningen	Löpnr Ange löpnr.	Dokumentklass Riktlinje	Version 1.1	Sida 3(3)
Författare Katarina Funseth Medicinskt ansvarig Rehabilitering, Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sköterska, med stöd av Matilda Foborg Region Västernorrland hygiensjuksköterska			Datum: 2021-06-24	Datum fastställande: Ange datum

- a) Användaren själv och anhöriga ansvarar för den regelbundna skötseln och rengöring av hjälpmedel. När användaren eller anhöriga inte förmår sköta hjälpmedlet får annan utsedd person eller funktion ta över ansvaret.
- b) I första hand är det kontaktperson, omvårdnadspersonal eller personliga assistenter på respektive område som rengör och desinfekterar hjälpmedlet vid återlämning (Sundsvalls kommun; Rutin för hantering av individuella hjälpmedel 2014).
- c) Den legitimerade personalen ska, vid behov, ge råd och handledning till användaren, anhöriga eller omvårdnadspersonalen i hanteringen och rengöringen av hjälpmedlet. I de fall patienten enbart har haft hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal och det inte finns anhöriga som kan rengöra hjälpmedlet ansvarar hälso- och sjukvårdspersonal för rengöring och desinfektion av smittade hjälpmedel.